



PHIT METHOD

PERFORMANCE

Lipolyse Localisée



Lipolyse Localisée

(Photobiomodulation et
action mécanique manuelle)

Lipolyse



EFFICACITE ANTI-RIDES


- 75% des sujets ont l'effet attendu
- 62% ont un effet retonifiant
- 81% ont une peau plus ferme

EFFICACITE ANTI-VERGETURES

- 34% des sujets indiquent un effet global positif
- 33% indiquent des vergetures moins visibles
- 19% notent que certaines ont clairement disparues

EFFICACITE ANTI-CELLULITE

- Un effet sur 70% des sujets (diminution de la jonction dermo-hypodermique)
71% des sujets ont une variation de la densité de peau avec un effet désinfiltrant positif

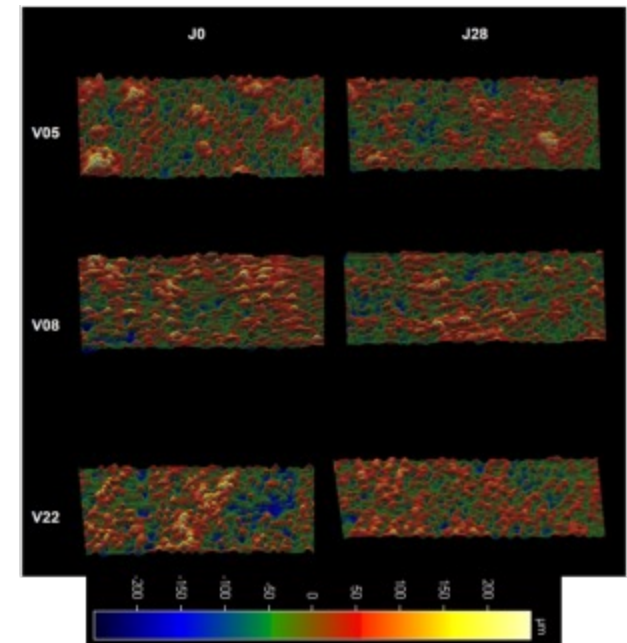

Lipolyse



Dispositif Néolys+ Cosmetique™ REMISE EN FORME (FOR-U)	Prog	Champs d' action	Durée de la séance (min)
Programme	1	Traitement des Rides: anti-âge, défatigue et lisse, régénère la peau	8'30
Programme	3	Vergetures rouges et blanches	7'40
Programme	4	Cellulite	10'30
Programme	4	Récupération Sportive	6'30

Lipolyse



Néolys+™ LCD-U LCD-P(pro)	Prog	Objectif	Séances	Durée protocole	Complément
Programme	1	Anti-âge	1 séance toutes les 48h sur la zone à concernée	4 semaines	
Programme	2	Anti-tâches et pollution	1 séance toutes les 48h sur la zone à concernée	4 semaines	
Programme	3	Vergetures Rouges	A. 1 séance toutes les 48h sur la zone concernée B. puis 3 séances par semaine	A. 3 semaines B. 3 semaines	
Programme	3	Vergetures Blanches	A. 1 séance toutes les 48h sur la zone concernée B. puis 3 séances par semaine	A. 4 semaines B. 8 semaines	
Programme	4	Cellulite	1 séance toutes les 48h sur la zone à concernée	4 semaines	massage pour accélérer l'élimination de la graisse

Lipolyse



- L'action mécanique :
 - Un massage de la zone ciblée par le système de photobiomodulation :
 - - pression entre le pouce et l'index
 - - rouler la zone entre les doigts en gardant la pression